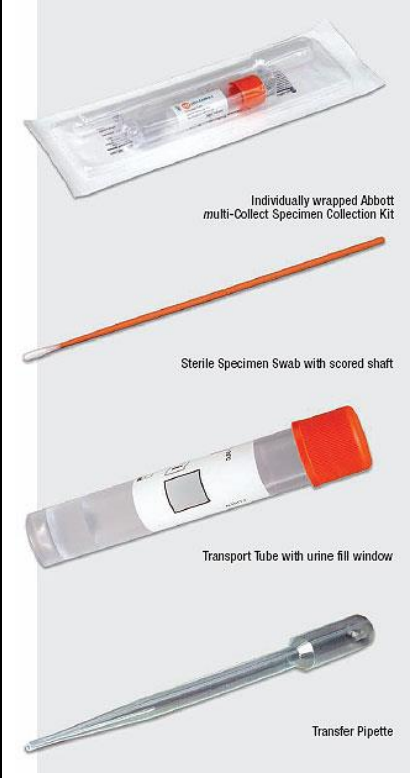


คำแนะนำการใช้ชุดเก็บสิ่งส่งตรวจ สารคัดหลั่งจากช่องคลอด (ตกขาว)
 แผลที่อวัยวะเพศ - ทวารหนัก หรือชุดตรวจปัสสาวะ เพื่อหาการติดเชื้อ 15 โรค

ชุดตรวจโรคทางเพศที่เฮลท์สไมล์ ให้บริการ มีไว้สำหรับการเก็บตัวอย่างและการขนส่งตัวอย่างจาก ไม้พันสำลี (สวอป) และปัสสาวะ ของทั้งเพศชายและเพศหญิง เพื่อตรวจหาเชื้อโรคทางเพศตามคำแนะนำที่ให้ไว้

ภายในชุดตรวจประกอบด้วย

 <p>Individually wrapped Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit</p> <p>Sterile Specimen Swab with scored shaft</p> <p>Transport Tube with urine fill window</p> <p>Transfer Pipette</p>	<p>ชุดเก็บสิ่งส่งตรวจบรรจุหีบห่อที่ปิดสนิท (The Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit) 1 ชุด ซึ่งภายในประกอบไปด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ไม้พันสำลี (สวอป, Swab) : สำหรับเก็บตัวอย่างที่บรรจุแยกชิ้นโดยปราศจากเชื้อ จำนวน 1 ชิ้น Sterile Specimen Swab with scored shaft ○ หลอดขนส่ง : ใส่น้ำยาสำหรับขนส่งสิ่งส่งตรวจ ซึ่งมีสารละลายสำหรับขนส่งตัวอย่างที่ทำให้ DNA เสถียรจนกว่าจะถึงศูนย์ตรวจ และช่องสำหรับดูปริมาณปัสสาวะ (ฝาสีส้ม) จำนวน 1 หลอด Transport Tube with urine fill window ○ หลอดปิเปต (หลอดดูดพลาสติก) : สำหรับเก็บปัสสาวะ แบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน 1 หลอด Transfer Pipette
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. เอกสาร : คำแนะนำการใช้ชุดเก็บสิ่งส่งตรวจ สารคัดหลั่งจากช่องคลอด (ตกขาว) แผลที่อวัยวะเพศ - ทวารหนัก หรือชุดตรวจปัสสาวะ เพื่อหาการติดเชื้อ 15 โรค (ภาษาไทย / อังกฤษ)
2. เอกสาร : ใบส่งตรวจหาเชื้อโรคที่ทำให้เกิดความผิดปกติที่อวัยวะเพศ Sexual related infection testing form.
3. กระปุกสำหรับเก็บปัสสาวะ : ชนิดผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว (ฝาสีเขียว)
4. ถังซิปล็อค : สำหรับใส่หลอดขนส่งเพื่อส่งกลับ จำนวน 1 ถัง
5. ขงไปรษณีย์บุกันกระแทก พร้อมที่อยู่ : สำหรับส่งหลอดน้ำยากลับมายังศูนย์แลป

วัตถุประสงค์การใช้งาน

ชุดตรวจนี้ ใช้สำหรับการเก็บ การรักษา และขนส่งสิ่งส่งตรวจเพื่อนำมาตรวจหาโรคทางเพศได้หลากหลายประเภท สามารถใช้ได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย โดยสิ่งส่งตรวจที่สามารถเก็บได้ ได้แก่ สารคัดหลั่งจากช่องคลอด (ตกขาว), สารคัดหลั่งจากปลายท่อปัสสาวะ, น้ำปัสสาวะ หรือ สารคัดหลั่งจากแผลที่อวัยวะเพศ-ทวารหนัก

วิธีการเก็บ วันหมดอายุ และข้อห้ามในการเก็บสิ่งส่งตรวจ

- เก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรง
- วันหมดอายุโปรดดูที่บรรจุภัณฑ์
- ห้ามใช้ชุดเก็บนี้ หากบรรจุภัณฑ์เสียหาย หรือน้ำยารั่วจากหลอด หากพบว่าชุดตรวจไม่สมบูรณ์ ให้แจ้งบริษัททันที
- ห้ามเก็บสิ่งส่งตรวจ ชนิดไม้พันสำลี (สวอป) และปัสสาวะรวมกันในหลอดขนส่งหลอดเดียวกัน
- การมีเลือด สารคัดหลั่งอื่นๆ สารฆ่าเชื้ออสุจิบางชนิด และยารักษาภาวะผิดปกติที่ช่องคลอด เช่น ยาฆ่าเชื้อรา อาจรบกวนการตรวจได้ ผลกระทบของปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลต่อการตรวจได้ เช่น การใช้ผ้าอนามัยแบบสอด การสวนล้างช่องคลอด หรือการเก็บตัวอย่างผิดวิธีก็อาจส่งผลต่อการตรวจได้

การส่งตัวอย่างกลับมาที่ห้องปฏิบัติการ

สิ่งส่งตรวจควรส่งกลับมาที่ห้องปฏิบัติการโดยเร็วที่สุดหลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ ตัวอย่างสามารถคงความแม่นยำของการตรวจเชื้อได้นานสูงสุดถึง 14 วัน แต่แนะนำให้ส่งตรวจภายใน 48 ชั่วโมงหลังเก็บสิ่งส่งตรวจแล้วเสร็จ

ก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจ

- สามารถเก็บสิ่งส่งตรวจได้ทุกเวลา ตามที่ต้องการ แต่แนะนำให้ตรวจหลังตื่นนอน หรือตรวจห่างจากการปัสสาวะครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้มีปริมาณเชื้อสำหรับการตรวจมากยิ่งขึ้น
- กรณีเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยไม้ swab ควรหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนปัสสาวะ กระดาษชำระ หรือสิ่งอื่นๆระหว่างเก็บสิ่งส่งตรวจ
- กรอกข้อมูลใน “เอกสาร : ใบส่งตรวจหาเชื้อโรคที่ทำให้เกิดความผิดปกติที่อวัยวะเพศ Sexual related infection testing form” ในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ให้เรียบร้อย หากไม่แน่ใจเรื่องกรอกข้อมูลสามารถสอบถาม Admin ได้
- หากไม่ต้องการให้เปิดเผยตัวตนผู้เข้ารับการตรวจ ให้ใส่ข้อมูลนิรนามได้

จำนวนบรรจุ : หนึ่งชุดต่อกล่อง

ผู้ผลิต : Abbott Molecular Inc. 1300 East Touhy Avenue, Des Plaines IL 60018 USA

ผู้นำเข้าชุดตรวจ : บริษัท คิว ไบโอไฮยอน จำกัด
เลขที่ใบรับจดแจ้ง 64-2-3-1-0002207

ศูนย์ตรวจ : บริษัท นิวเจน ไดแอกโนสติกส์ จำกัด

ผู้ให้บริการ : บริษัท วัฒนาเมดิคอลแอนด์เวลล์บีอิง จำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท เฮลท์สไมล์ จำกัด)

899/17 หมู่ที่ 2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

Email : Contact@HealthSmile.co.th

โทร : 0898749565

LINE ID : @HealthSmile

ขั้นตอนการเก็บสิ่งส่งตรวจจากสารคัดหลั่งจากช่องคลอด(ตกขาว) แผลที่อวัยวะเพศ-ทวารหนัก

1. อ่านข้อมูลในเอกสารนี้อย่างละเอียด หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่ 089 874 9565 หรือ LINE ID : @HealthSmile
2. ล้างมือให้สะอาด
3. ในห้องที่เป็นส่วนตัว ให้เปลี่ยนผ้าตั้งแต่เอวลงมา นั่งบนสุขภัณฑ์หรือเก้าอี้ที่สะอาดกสบาย
ไม่ต้องทำความสะอาด หรือสวนล้างช่องคลอด หรือล้างแผลด้วยน้ำหรือยาทำแผลใดๆ เพราะอาจทำให้ปริมาณเชื้อที่จะตรวจได้ลดลง
4. เปิดบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก จะเห็นซองสีขาวที่เขียนว่า Specimen Collection Swab ภายในจะมี **ไม้ปั่นสำลีสัม** อยู่
5. เปิดซองบรรจุภัณฑ์ที่มีไม้ปั่นสำลีเพื่อเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจในตำแหน่งที่ต้องการ ดึงไม้ปั่นสำลีออกมาอย่างระมัดระวัง อย่าจับโดนปลายสำลี อย่าวางลงบนพื้น

กรณีตรวจสารคัดหลั่งจากช่องคลอด (ตกขาว)

- ถือไม้ปั่นสำลีสัมไว้ในมือ โดยใช้สองนิ้ว คือ วางนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ไว้ตรงบริเวณรอยคอดของก้านไม้ปั่นสำลีสัม ระวังอย่าให้ไม้ปั่นสำลีหัก
- ค่อยๆ สอดไม้ปั่นสำลีเข้าไปในช่องคลอดของคุณประมาณ 5 ซม. หรือจนนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ชิดติดกับอวัยวะเพศ แล้วค่อยๆ หมุนไม้ปั่นสำลีเป็นเวลา 15 ถึง 30 วินาที ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายไม้ปั่นสำลีสัมสัมผัสกับผนังของช่องคลอดเพื่อให้สารคัดหลั่ง (ตกขาว) ถูกดูดซับโดยสำลีปลายไม้
- ดึงไม้ปั่นสำลีออกจากช่องคลอดอย่างระมัดระวัง และถือไว้ในมือต่อไป

กรณีตรวจสารคัดหลั่งจากแผลที่อวัยวะเพศ หรือ ทวารหนัก

- ค่อยๆ นำไม้ปั่นสำลีป้ายบริเวณแผลที่อวัยวะเพศ หรือ ทวารหนัก เริ่มจากตุ่มที่ยังไม่เป็นแผล หรือเป็นแผลที่แห้งแล้วก่อน (ถ้ามี) จากนั้นค่อยเคลื่อนไปป้ายแผลสด ที่ยังมีเลือด หนอง หรือสารคัดหลั่งอยู่ แต่ละจุดค่อยๆ หมุนไม้ปั่นสำลีเป็นเวลา 10 วินาที ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายไม้ปั่นสำลีสัมสัมผัสกับแผลทุกส่วน ทั้งบริเวณกลางแผล และขอบแผล รวมถึงที่เป็นสะเก็ด ทำจนครบทุกส่วนที่มีแผล เพื่อให้สารคัดหลั่งถูกดูดซับโดยสำลีปลายไม้
6. วางไม้ปั่นสำลีที่เก็บตัวอย่างแล้วลงในหลอดน้ำยาสำหรับขนส่งทันที และค่อยๆ หักตรงบริเวณรอยคอดของก้านลงในหลอดโดยไม่ต้องนำไม้ออกจากหลอด และทิ้งส่วนบนของก้านไม้ที่ไม่มีสำลีสัมอยู่ ปิดฝาหลอดน้ำยาให้แน่น เก็บใส่ถุง Ziplock ที่มีมาให้ และนำใส่ถุงกันกระแทกไว้อีกชั้นเพื่อรอนำส่ง

ขั้นตอนการเก็บปัสสาวะ

1. อ่านข้อมูลในเอกสารนี้อย่างละเอียด หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่ 089 874 9565 หรือ LINE ID : @HealthSmile
2. ควรกลั้นปัสสาวะไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนการตรวจ
 - สำหรับเพศหญิง **ไม่ควร** ทำความสะอาดที่บริเวณอวัยวะเพศก่อนการเก็บปัสสาวะ
 - สำหรับเพศชาย **ไม่ควร** ทำความสะอาดที่ปลายองคชาตก่อนการเก็บปัสสาวะ
3. ล้างมือให้สะอาด
4. เริ่มเก็บปัสสาวะ “ตั้งแต่ช่วงแรกที่ปัสสาวะออก” ประมาณ 20-30 ซีซี (ประมาณ 1ใน3 – 2ใน3 ของกระปุกใหญ่ ฝาสีเขียว) ปริมาณปัสสาวะที่มากเกินไป อาจจะทำให้เชื้อถูกเจือจางและอาจตรวจไม่พบได้
5. ฉีกถุงชุดตรวจ ที่มีหลอดปิเปต (หลอดดูดพลาสติก) จากนั้นใช้หลอดดูดเอาปัสสาวะ ประมาณ 3 ซีซี ไปใส่ในหลอดใส่น้ำยาเพื่อคงสภาพ DNA (ฝาสีส้ม) โดยปริมาณที่เหมาะสมสามารถสังเกตได้จากปริมาณปัสสาวะจะขึ้นไปสูงจนถึงช่องสีเหลี่ยมที่บริเวณหลอดน้ำยาเพื่อคงสภาพ DNA (ฝาสีส้ม)
6. ปิดฝาหลอดใส่น้ำยาเพื่อคงสภาพ DNA ให้แน่นหนา แล้วพลิกหลอดกลับไปมาสามถึงสี่ครั้ง เพื่อให้ปัสสาวะผสมกับสารคงสภาพ DNA ภายในหลอดได้อย่างทั่วถึง
7. เก็บหลอดใส่น้ำยา (ฝาสีส้ม) ใส่ถุง Ziplock ที่มีมาให้ และนำใส่ถุงกันกระแทกไว้อีกชั้นเพื่อรอนำส่ง

ขั้นตอนการนำส่งเข้าสู่ศูนย์แลป

มีสองวิธี ดังนี้

1. เรียก Messenger เข้ารับ โดยการแจ้ง Admin ที่ LINE ID @HealthSmile และรอเจ้าหน้าที่เข้ารับสิ่งส่งตรวจ
2. ส่งชุดตรวจทางไปรษณีย์ EMS โดยบรรจุในซองไปรษณีย์กันกระแทก ที่มีที่อยู่สำหรับส่งหลอดน้ำยากลับมายังศูนย์แลป

ข้อควรระวัง

- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถใช้ซ้ำได้
- น้ำยาในหลอดเก็บสิ่งส่งตรวจไม่สามารถรับประทานได้ หากรับประทานเข้าไปหรือกระเด็นเข้าตาโปรดปรึกษาแพทย์ทันที
 - หากน้ำยาในหลอดหกเลอะผิวหนัง ให้ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยสบู่และน้ำ
 - แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือผู้ดูแลหากเกิดการระคายเคือง
 - เก็บให้พ้นจากมือเด็ก